

CANETA ACIONADORA

PARA ELETROESTIMULAÇÃO

Mais praticidade, liberdade
e alcance para seus
exercícios.



**ACIONAMENTO
PRÁTICO**



**CABO COM
MAIOR ALCANCE**



**FÁCIL
DE USAR**

Seu treino com mais liberdade

1 FINALIDADE

A Caneta Acionadora foi desenvolvida para permitir que o profissional ative o músculo no momento exato do movimento, sincronizando a eletroestimulação com a atividade terapêutica. Isso proporciona mais precisão, controle e aproveitamento durante o exercício.

2 COMPONENTES



3 COMO CONECTAR

- 1 Verifique se o eletroestimulador está desligado.
- 2 Conecte a caneta ao cabo ou à entrada compatível do equipamento.
- 3 Posicione os eletrodos conforme orientação do profissional responsável.
- 4 Ligue o eletroestimulador e ajuste os parâmetros conforme prescrição ou orientação profissional.



Use sempre com orientação de um profissional.

4 COMO UTILIZAR



- 1 Segure a caneta de maneira confortável.



- 2 Pressione o botão para acionar a estimulação.



- 3 Mantenha pressionado pelo tempo necessário durante o movimento ou exercício.



- 4 Solte o botão para interromper o acionamento.



- 5 Ao terminar, desligue o eletroestimulador antes de desconectar os cabos.

5 LIMPEZA



- Desligue e desconecte o produto.



- Limpe a parte externa com pano macio levemente umedecido.



- Não utilize álcool em excesso, produtos abrasivos ou solventes.



- Aguarde a secagem completa antes de usar novamente.

6 CUIDADOS IMPORTANTES



Utilize somente com equipamentos e conectores compatíveis.



Não puxe ou transporte o produto pelo cabo.



Não dobre o cabo com força.



Não utilize se houver fios expostos, conectores soltos ou danos no produto.



Não molhe, mergulhe ou utilize próximo à água.



Não abra ou tente consertar a caneta.



Mantenha fora do alcance de crianças sem supervisão.



A intensidade e o posicionamento dos eletrodos devem ser definidos por profissional habilitado.

7 ARMAZENAMENTO



Guarde a caneta em local seco, protegido do calor e da luz solar direta. Enrole o cabo sem apertar ou fazer dobras fortes.



ATENÇÃO

A caneta é um acessório de acionamento e não substitui o eletroestimulador nem a orientação de um profissional.